

Silverix

garze sterili senza conservanti
**14 garze sterili monouso per il trattamento
topico delle palpebre e della zona perioculare
dell'adulto e del bambino**

INDICAZIONI

Silverix è indicato per la rimozione meccanica di residui dalle palpebre e dalle ciglia sia nell'adulto che nel bambino, anche in presenza di secrezioni conseguenti a fenomeni infiammatori e/o infettivi, quali blefariti e blefarocongiuntiviti di diversa natura (anche in presenza di desquamazione cutanea). Il suo utilizzo risulta particolarmente valido anche come coadiuvante di eventuali trattamenti farmacologici, in stati patologici infiammatori, allergici o nella fase pre- e/o post-operatoria di interventi chirurgici o laser.

Silverix è inoltre consigliato per il trattamento quotidiano della zona perioculare per la rimozione di residui di prodotti cosmetici dalle palpebre e dalle ciglia in soggetti predisposti all'insorgenza di blefariti e blefarocongiuntiviti di diversa natura, disfunzione della ghiandola di Meibomio (DGM), Rosacea, bruciore, prurito o irritazione, arrossamento e gonfiore e altre patologie a livello dei margini delle palpebre.

Silverix, per la sua peculiare composizione, consente l'utilizzo anche da parte dei portatori di lenti a contatto.

PROPRIETÀ

Il sodio ialuronato costituisce un componente fondamentale della matrice extracellulare della maggior parte dei tessuti. Grazie alla sua capacità di trattenere acqua e al suo potere filmogeno, esplica un'attività idratante e protettiva.

Tutti i componenti di Silverix risultano utili anche per ottenere un'ottimale attività detergente ed emolliente (Camomilla ed Eufrasia) nel pieno rispetto della fisiologia della zona perioculare, particolarmente delicata e sensibile. La peculiare composizione di Silverix è indicata come coadiuvante nel trattamento di fenomeni infiammatori e infettivi di diversa natura della zona perioculare, favorendo la riparazione dei tessuti danneggiati.

COMPOSIZIONE

Garza di cotone 100%, imbevuta di 2,8 ml della seguente soluzione: argento colloidale, sodio ialuronato, chamomilla recutita, euphrasia officinalis, glicole di

propilene, alcol feniletico, PEG-40 castor oil, PEG-40 olio di ricino idrogenato, coccoaminoacido di grano, ammonio glicerizzato, sodio bicarbonato, sodio cloruro, aroma, polisorbato 20, etilesilglicerina, acqua.

MODALITÀ D'USO


Dopo aver pulito accuratamente le mani, aprire la bustina ed estrarre la garza. Applicare la garza nella zona palpebrale, passandola delicatamente, in modo da permettere un'adeguata detersione, un'asportazione delle secrezioni oculari e di eventuali depositi di altro tipo (smog, pulviscolo, polveri, ecc.).

Nel caso si presentassero secrezioni particolarmente persistenti o occlusione del canalicolo lacrimale, è consigliabile scaldare la busta chiusa per qualche minuto in acqua tiepida (40 °C circa) e utilizzare poi la garza come impacco caldo massaggiando la zona delicatamente.

Nel caso, invece, di flogiosi è consigliabile raffreddare la bustina chiusa in frigorifero per qualche ora e applicare poi la garza aperta sull'occhio, mantenendola in loco per qualche minuto come impacco freddo.

AVVERTENZE

La sterilità del prodotto è garantita solo se la busta è integra. In caso di stati infettivi non utilizzare la stessa garza per entrambi gli occhi. La garza è monouso, il riutilizzo potrebbe essere veicolo di infezioni. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno. Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi evidenti o di ipersensibilità al prodotto. Monouso. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

 PROMEIA S.p.A. Corso della Vittoria 1585/1533 I-
21042 Caronno Pertusella (VA)

Distributore esclusivo:

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l. Via
Fratelli Bandiera 26 80026 Casoria (Italia)

 **CE** 0425

STERILE R



P4281a4 IDG01/1E