

Oftaial Plus

Soluție oftalmică
Flacon de 10 ml

Compoziție

100 ml de soluție conțin:

hialuronat de sodiu 0,4 g; taurină 0,5 g; clorură de sodiu; clorură de magneziu; clorură de potasiu; dihidrogenofosfat de sodiu; fosfat de sodiu dibazic; apă pentru preparate injectabile.

Ambalaj

O cutie Oftaial Plus conține 1 flacon multidoză fără conservanți, de 10 ml.

Ce este Oftaial Plus

Oftaial Plus este o soluție oftalmică.

De ce se folosește

Oftaial Plus este o soluție hipotonică care se distribuie pe suprafața oculară sau pe lentilele de contact, în special în cazul simptomului de „ochi uscat”. Datorită conținutului ridicat de hialuronat de sodiu (0,4%) și sărurilor precum magneziul și potasiul, Oftaial Plus umezește și lubrifică suprafața oculară, reducând riscul de instabilitate a filmului lacrimal. În plus, particularitatea compoziției soluției Oftaial Plus constă în prezența taurinei, cel mai abundent aminoacid din punct de vedere fiziologic din lichidul lacrimal și, în general, din toate țesuturile segmentului anterior al ochiului. Mai multe studii demonstrează că prezența taurinei crește procentul de celule care supraviețuiesc în condiții de hiperosmolaritate. Hiperosmolaritatea, la nivelul filmului lacrimal, este asociată cu apariția simptomului de „ochi uscat”.

Prin urmare, Oftaial Plus, cu toate că nu are un efect farmacologic, protejează epiteliul cornean împotriva posibilelor daune cauzate de diferite condiții care pot provoca apariția așa-numitului „ochi uscat”, de exemplu:

- condiții climatice și de mediu adverse, cum este vântul, frigul, soarele, aerul sărat, aerul condiționat, fumul, smogul sau praful fin;

- condiții deosebite de stres oftalmic datorate utilizării lentilelor de contact sau lucrului îndelungat la monitor sau la microscop.

Acțiunea de lubrifiere este utilă mai ales când, în condiții fizice deosebite sau ca urmare a administrării unor medicamente, lacrimarea se reduce, de exemplu la menopauză și în timpul tratării diabetului.

În plus, la purtătorii de lentile de contact, Oftaial Plus permite lubrifierea și hidratarea lentilei pentru a facilita aplicarea sau înlăturarea acesteia, contribuind la o senzație de confort în timpul zilei.

Când nu trebuie folosit

Hipersensibilitate la componentele sale sau la alte substanțe străns corelate din punct de vedere chimic.

Precauții de utilizare

Oftaial Plus este doar pentru uz extern. Oftaial Plus nu trebuie utilizat imediat înainte de administrarea medicamentelor în scopuri curative și nici în următoarele zece minute după administrarea topică a unui eventual tratament medicamentos.

Pentru a reduce riscul de contaminare, fiecare flacon trebuie să fie utilizat de o singură persoană. Evitați ca vârful flaconului să intre în contact direct cu degetele, cu ochiul, cu lentila de contact sau cu orice altă suprafață. De asemenea, evitați ca flaconul să intre în contact cu murdărie sau praf.


Cât de des și cât timp trebuie folosit Oftaial Plus

Dozarea Oftaial Plus este individuală, în funcție de starea dumneavoastră și de recomandările medicului oftalmolog. În general, se instilează 1-2 picături de soluție în sacul conjunctival al fiecărui ochi atunci când este nevoie, chiar și de mai multe ori pe zi. Pentru utilizarea pe lentile de contact: instilați o picătură pe fiecare lentilă în momentul aplicării și al îndepărtării. Repetați când este nevoie, chiar și de mai multe ori pe zi.

Cum se aplică Oftaial Plus

Deschideți flaconul înlăturând aripioara de protecție. Scoateți capacul. Apăsând pe

flaconul răsturnat cu fața în jos, instilați 1-2 picături de Oftaial Plus în sacul conjunctival al fiecărui ochi, lăsându-le să cadă de sus. După fiecare utilizare, închideți flaconul cu dopul din dotare. Nu trebuie să deteriorați sau să demontați flaconul și nu trebuie să deteriorați sau să blocați mecanismul orificiului flaconului.

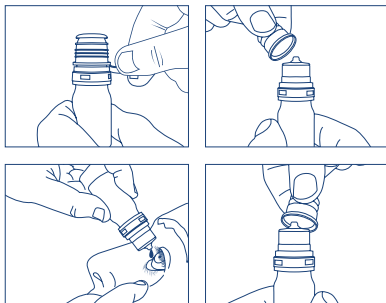

Pentru utilizarea pe lentile de contact: instilați câte o picătură de Oftaial Plus în cavitatea fiecărei lentile în momentul aplicării și al îndepărtării.

Reacții adverse

În cazuri rare s-a observat o ușoară închețare a vederii în momentul instilării, care se datorează vâscozității soluției. Această senzație va dispărea, însă, foarte repede. Se poate manifesta, în cazuri rare, o intoleranță (senzație de arsură și/sau iritație); aceasta este fără consecințe și nu necesită modificarea tratamentului. În orice caz, vă

recomandăm să contactați medicul oftalmolog în cazul prelungirii simptomelor. Respectarea instrucțiunilor din prospect reduce riscul de reacții adverse.

Termenul de expirare și modul de păstrare

Oftaial Plus trebuie păstrat la o temperatură cuprinsă între 2°C și 25°C. Soluția trebuie să fie utilizată în decurs de 6 luni de la prima deschidere a flaconului. După această perioadă, aruncați flaconul, chiar dacă mai conține resturi de soluție.

Atenție

Nu folosiți soluția după data de expirare indicată pe ambalaj.

Data de expirare se referă la produsul intact și păstrat în mod corect. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. Nu utilizați Oftaial Plus dacă flaconul este deteriorat. Nu apăsați flaconul dacă este închis cu capacul.



Producător:

ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore S.r.l.

Via Fratelli Bandiera 26
80026 Casoria (NA) – Italia

Distribuit în România de:

Alliance Healthcare România S.R.L.

Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,
Sector 6, București

Telefon: (+4) 021-407771

