

Ialuvit

Soluție oftalmică

Compoziție

100 ml soluție conțin:

Hialuronat de sodiu 0,5 g, cianocobalamină 0,05 g, taurină 0,5 g, sorbitol, citrat trisodic, clorură de sodiu, clorură de potasiu, clorură de magneziu, fosfat de sodiu dibazic, dihidrogenofosfat de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

Ambalaj

O cutie Ialuvit conține 15 flacoane resigilabile, de 0,6 ml.

Ce este Ialuvit

Ialuvit este o soluție oftalmică.

De ce se folosește

Ialuvit este o soluție cu un înalt conținut de hialuronat de sodiu (0,5%) care, datorită proprietăților sale mucomimetice și pseudoplastice, se distribuie uniform pe suprafața oculară formând un bandaj de protecție vâscoelastic. Astfel, Ialuvit stabilizează filmul lacrimal și reduce frecarea și solicitările cauzate de clipire și de mișcările oculare. Cianocobalamina și taurina, mai exact o vitamină din complexul B și un aminoacid, sunt prezente din punct de vedere fiziologic în țesuturile segmentului anterior al ochiului și, împreună cu acidul hialuronic, pot fi adjuvanți în procesul de reepitalizare a suprafeței corneene.

Ialuvit are la bază o formulă de soluție hipotonică cu rol de compensare a posibilei hiperosmolarități a filmului lacrimal și, datorită compoziției sale saline speciale, reface și menține la nivel fiziologic concentrația unor ioni importanți, precum sodiul, potasiul și magneziul, esențiali pentru bunăstarea suprafeței oculare.

Când nu trebuie folosit

Hipersensibilitate la componentele sale sau la alte substanțe străns corelate din punct de vedere chimic.

Precauții de utilizare

Ialuvit este doar pentru uz extern. Ialuvit nu trebuie utilizat imediat înainte de administrarea medicamentelor în scopuri curative și nici în următoarele zece minute după administrarea topică a unui eventual tratament medicamentos.

Cât de des și cât timp trebuie folosit Ialuvit

Dozarea Ialuvit este individuală, în funcție de starea dumneavoastră și de recomandările medicului oftalmolog. În general, se instilează 1-2 picături de soluție în sacul conjunctival al fiecărui ochi, de câte 3-4 ori pe zi.

Cum se aplică Ialuvit

Pentru a reduce riscul de contaminare a produsului în timpul utilizării, punga de aluminiu trebuie deschisă numai în cazul utilizării imediate a produsului. Desprindeți un singur

flacon de pe bandă. Pentru a deschide flaconul, îndepărtați clapeta superioară rotind-o, având grijă să o așezați pe o suprafață curată astfel încât să o puteți utiliza din nou la închiderea flaconului. Instilați 1-2 picături în fiecare ochi, lăsându-le să cadă de sus, astfel încât flaconul să nu vă atingă genele sau suprafața oculară.

Închideți flaconul cu clapeta imediat după utilizare.

Ialuvit poate fi utilizat și dacă purtați lentile de contact.

Reacții adverse

În cazuri rare s-a observat o ușoară încrețșoare a vederii în momentul instilării, care se datorează vâscozității soluției. Această senzație va dispărea, însă, foarte repede. Se poate manifesta, în cazuri rare, o intoleranță (senzație de arsură și/sau iritație); aceasta este fără consecințe și nu necesită modificarea tratamentului. În orice caz, vă recomandăm să contactați medicul oftalmolog în cazul prelungirii simptomelor. Respectarea instrucțiunilor din prospect reduce riscul de reacții adverse.

Termenul de expirare și modul de păstrare

Ialuvit trebuie păstrat la o temperatură cuprinsă între 2°C și 25°C.

Fiecare recipient poate fi închis, permițând astfel administrări repetate ale soluției, care trebuie utilizată totuși în decurs de 24 de ore de la prima deschidere întrucât nu conține conservanți.

Atenție

Nu folosiți preparate după data de expirare indicată pe ambalaj.

A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor. Culoarea roșie a produsului se datorează cianocobalaminei și nu indică alterarea produsului. În caz de utilizare cu lentile de contact, soluția oftalmică poate cauza o colorare a acestora; acest lucru este doar temporar și nu deteriorează în niciun mod lentilele.

CE 0123

STERILE A



Producător:

ALFA INTES

Industria Terapeutica Splendore S.r.l.

Via Fratelli Bandiera 26

80026 Casoria (NA) – Italia

Distribuit în România de:

Alliance Healthcare România S.R.L.

Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,

Sector 6, București

Telefon: (+4) 021-4077711



flacoane resigilabile